

# SENIOR SERVIS

zajišťováno společností ORTOSERVIS



## SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY



# UP

- STAIRLIFT -

[www.seniorservis.cz](http://www.seniorservis.cz)

# SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY



# PROČ PRÁVĚ SEDAČKY OD NÁS

Pokud se pro schodišťovou sedačku rozhodnete, je potřeba nejprve vybrat vhodný typ pro Vaše schodiště, zvolit možnosti sedáku a kolejnice podle vašich potřeb a v neposlední řadě také vybrat vhodný design a barevnost sedačky popřípadě kolejnice tak, aby vhodně doplňovala Váš interiér. Pokud se rozhodnete vybrat si některou ze schodišťových sedaček Handicare nebo DEVI Stairlift, zde jsou první základní informace:



- Hlavním kritériem při výrobě i instalaci schodišťových sedaček je bezpečnost uživatele. Všechny schodišťové sedačky mají řadu bezpečnostních senzorů na pohonné jednotce i stupačce, které sedačku zastaví, pokud by se setkala s jakoukoliv překážkou. Na sedáku jsou také další bezpečnostní prvky, které zajišťují, aby byla sedačka použita pouze pokud je uživatel usazen na sedáku se sklopenou stupačkou a područkami. Bezpečnostní pás, kterým jsou sedačky standardně doplněny, dále zvyšuje pocit bezpečí uživatele.
- Ovládání schodišťových sedaček je snadné a velmi jednoduché. Na područce je velká páčka nebo joystick, který stačí vychýlit ve směru, ve kterém chcete, aby se sedačka pohybovala. Područku lze stále použít k pevnému úchopu. Ovládání i pohyb sedačky probíhá v tempu uzpůsobeném pro osoby seniorského věku.
- Ke každé schodišťové sedačce jsou dodávány minimálně dva dálkové ovladače, aby bylo možno sedačku přivolat, pokud se nachází v jiné stanici.
- Kolejnice schodišťových sedaček jsou upevněny do schodišťových stupňů a obvykle nejsou zapotřebí žádné stavební úpravy. Pokud z jakéhokoliv důvodu není možno kolejnici upevnit do schodiště, navrhne Vám náš technik jiné možnosti.
- Pohonnou jednotku schodišťové sedačky napájí baterie. Je možno ji tedy použít i v případě výpadku proudu. Při instalaci je potřeba schodišťovou sedačku zapojit do zásuvky 230 V.
- Pokud se pro schodišťovou sedačku rozhodnete, nemusíte sami nic měřit, ani vybírat nevhodnější typ sedačky, nebo kolejnice. Zavolejte nám, poradíme Vám a domluvíme se na bezplatném zaměření a návrhu té nevhodnější schodišťové sedačky pro Vás.
- Na schodišťové sedačky poskytujeme záruku 5 let. Jediný nezbytný servis je výměna akumulátoru po několika letech používání. Každé dva roky Vám doporučujeme objednat si kontrolu Vaší schodišťové sedačky.
- Schodišťová sedačka je ve smyslu zákona 329/2011 Sb. zvláštní pomůckou, na kterou tělesně postiženému občanovi přispívá Úřad práce ČR až do výše 90 % ceny této pomůcky. Jako podklad Vaší žádosti poslouží cenová nabídka od nás. Rádi Vám s postupem žádosti poradíme.



## JAKÁ SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA JE VHODNÁ NA MÉ SCHODIŠTĚ

Základním parametrem pro výběr vhodné schodišťové sedačky pro Vaše schodiště je, zda na schodišti budete cestovat v přímé dráze, anebo je na schodišti zatáčka.

**Sedačky na přímá schodiště od strany 3**

**Sedačky na víceramenná schodiště od strany 9**




## HANDICARE 1100 STYLE

Nejnovější model schodišťové sedačky Handicare – tichý chod, jednoduchá kompaktní kolejnice a žádné požadavky na údržbu.

Tento nejnovější model přímé schodišťové sedačky přináší zásadní změnu v konstrukci kolejnice. Pohonná jednotka je na kolejnici upevněna čtyřmi přítlačnými koly se samosvorným mechanismem. Díky tomu může být kolejnice elegantnější a menší při zachování požadované robustnosti. Protože kolejnice nemá žádný ozubený hřeben, je chod sedačky plynulý a tichý. Na pohonné jednotce schodišťové sedačky je instalován sedák Style. Potah sedáku a zádové opěrky je omyvatelný a dodáváme jej v krémové barvě. K ovládní sedačky slouží páčka na pravé nebo levé područce, jejím vychýlením dojde k aktivování jízdy sedačky. Sedačka je doplněná bezpečnostním pásem a klíčkem, kterým lze sedačku uzamknout a zabránit tak jejímu nežádoucímu používání. Sedák lze v horní stanici manuálně otočit o 90°. Tím se velmi usnadní vstávání a nebo usedání a také zvýší pocit bezpečí uživatele. Sedačka má sklopný sedák, sklopnou stupačku a područky.

Sedačka je bateriová, její nabíjení probíhá po celé délce dráhy. Výhodou tohoto systému je, že je sedačka funkční i v případě výpadku proudu a zároveň je možno ji parkovat na kterémkoliv místě dráhy. Toto se může hodit v případě, že je v dolní nebo horní stanici úzká chodba nebo podesta a zaparkovaná sedačka by zde překážela. Součástí dodávky sedačky jsou vždy dva kusy dálkových ovladačů.

Doporučujeme instalovat schodišťovou sedačku Handicare 1100 na schodiště o minimální šíři 660 mm.

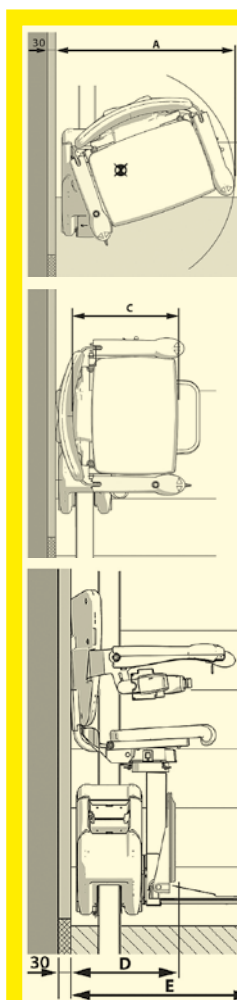

### HANDICARE 1100 STYLE

### ROZMĚR

<b>A</b>	Radius otáčení	645 mm
<b>C</b>	Hloubka sedačky	390 mm
<b>D</b>	Vzdálenost složené stupačky od zdi	320 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	530 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	575 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	450 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	400 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	430-520 mm
<b>J</b>	Výška nášlapné plochy stupačky nad podlahou	70 mm
-	Nosnost při sklonu schodiště 30 – 45°	140 kg
-	Nosnost při sklonu schodiště 46 - 50°	130 kg

**BAREVNÉ  
PROVEDENÍ SEDÁKU  
KRÉMOVÁ**



Některé z uvedených rozměrů jsou závislé na konkrétním provedení instalace na dané schodiště. Každé schodiště je individuální, při zaměření nebo instalaci se mohou vyskytnout okolnosti, které neumožní instalovat schodišťovou sedačku v takové pozici, která by umožňovala dodržení výše uvedených parametrů.

Schodišťovou sedačku H1100 můžeme dodat již do jednoho týdne od zaměření schodiště!






## HANDICARE 1000

Schodišťová sedačka pro přímá schodiště s úzkou kolejnicí a možností zesíleného provedení s nosností až 200 kg. Součástí sedačky je sedák SMART. Základní nosnost sedačky je 137 kg a maximální možná délka je 7m.

Na pohonné jednotce schodišťové sedačky je instalován sedák SMART. Potah sedáku a zádové opěrky je velmi odolný, omyvatelný a při objednání sedačky lze volit z níže uvedených barevností. K ovládání sedačky slouží páčka na podružce. Při objednání sedačky si můžete zvolit, zda si přejete sedačku ovládat pravou nebo levou rukou. Sedačka je doplněna bezpečnostním pásem a klíčkem, kterým lze sedačku uzamknout a zabránit tak jejímu nežádoucímu používání. Sedák lze v horní stanici manuálně otočit o 90°.



### BAREVNÁ PŘÍMĚNĚNÍ SEDÁKU

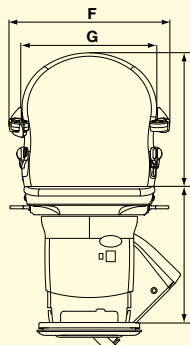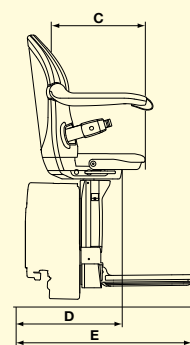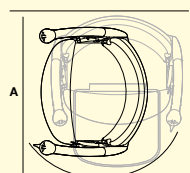

### HANDICARE 1000 SMART

### ROZMĚR

	Radius otáčení	670 mm
<b>A</b>	Radius otáčení při rozšíření područek o 56 mm	695 mm
	Radius otáčení při rozšíření područek o 102 mm	710 mm
	<b>C</b>	Hloubka sedačky
	Hloubka sedačky u sedáku se zvětšenou hloubkou	425 mm
<b>D</b>	Vzdálenost složené stupačky od zdi	385 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	650 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	550 mm
	Vnější šíře područek při rozšíření područek o 56 mm	590 mm
	Vnější šíře područek při rozšíření područek o 102 mm	635 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	410 mm
	Vnitřní šíře područek při rozšíření područek o 56 mm	470 mm
	Vnitřní šíře područek při rozšíření područek o 102 mm	512 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	455 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	465-540 mm
	Vzdálenost sedačky od stupačky - při zvýšené sedačce	675-875 mm
-	Standardní nosnost	137 kg
-	Zvýšená nosnost 160 kg (Handicare 1000 XL)	160 kg
-	Zvýšená nosnost 200 kg (Handicare 1000 XXL)	200 kg

Některé z uvedených rozměrů jsou závislé na konkrétním provedení instalace na dané schodiště. Každé schodiště je individuální, při zaměření nebo instalaci se mohou vyskytnout okolnosti, které neumožní instalovat schodišťovou sedačku v takové pozici, která by umožňovala dodržení výše uvedených parametrů.

Sedačka má sklopný sedák, sklopnou stupačku a područky. Sedačku lze doplnit řadou příslušenství jako je elektricky otočná sedačka nebo elektrické sklápění stupačky.

Kolejnici sedačky tvoří kompaktní hliníkový profil se skrytým ozubeným hřebenem. Kolejnice zužuje funkční část schodiště jen o 115 mm. Sedačka je bateriová, její nabíjení probíhá v dolní nebo horní stanici. Součástí dodávky sedačky jsou vždy dva kusy dálkových ovladačů.

Schodišťovou sedačku Handicare 1000 lze dodat se zvýšenou nosností 160 a nebo 200 kg. Jako jedna z mála sedaček na trhu může být dodána ve venkovním provedení. V této verzi je sedák vždy v šedé barvě z UV stabilního materiálu a sedačka je doplněna krytem.



## OTOČNÁ SEDAČKA

Sedáky schodišťových sedaček je možno v horní stanici otočit o 90° a usnadnit tak vstávání i usedání. U sedáku SMART může být tato funkce poháněna elektromotorem. Stačí podržet páčku ovládání ve směru jízdy. Při instalaci na některá schodiště je užitečná funkce elektrického otáčení i v dolní stanici.



## ZVÝŠENÁ SEDAČKA

Pokud máte omezenou hybnost kolenních nebo kyčelních kloubů, bude pro Vás usedání výrazně snazší a pohodlnější, pokud zvolíte zvýšenou sedačku. Tento doplněk může řešit také nedostatek místa pro kolena při instalaci schodišťové sedačky na úzká schodiště.



## SKLOPNÁ STUPAČKA

Abyste zaparkovaná sedačka na schodišti překážela co nejméně, jsou područky, stupačka a sedák sklopné. Abyste se nemuseli při sklápění stupačky ohýbat, může být její sklápění poháněno elektromotorem.



## SKLOPNÁ NEBO POSUVNÁ KOLEJNICE

Kolejnice schodišťové sedačky může v některých případech v dolní nebo horní stanici překážet. Kolejnice může zasahovat do chodby, u hrany schodiště mohou být dveře nebo jiné úzké místo. I pro tyto případy existuje řešení. Dolní úsek kolejnice může být manuálně nebo elektricky sklopný, anebo může být kolejnice elektricky posuvná. V takovém případě se při jízdě sedačky zároveň pohybuje i kolejnice a při parkování tak na konci nevyčnívá přes hranu schodiště. V některých případech je možno instalovat kolejnici s tzv. nulovým přesahem, kdy horní konec kolejnice nevyčnívá přes hranu schodiště a stupačka je zároveň v úrovni podlahy.





## UP - PŘÍMÁ

Schodišťová sedačka UP od Nizozemského výrobce DEVI Stairlifts je unikátní v několika aspektech. Jedná se o modulární systém kolejniče. Rovné díly je tedy možno doplnit i některými obloukovitými (zahnutými) segmenty a sedačku tak například zakončit zkráceným „nosem“ nebo přechodem do horizontálního úseku. Díky tomu je tato sedačka trochu na pomezí přímé a víceramenné.

Při návrhu a instalaci sedačky je možno nedostatky místa v dolní stanici vyřešit instalací sklopné kolejniče.

Sedačka UP sestává z pohonné jednotky a sedáku. Sedačka je vždy elektricky otočná a stupačka je elektricky sklopná. Na výběr jsou 4 barevnosti umělé kůže. Součástí instalace jsou také dva dálkové ovladače a samonavíjecí bezpečnostní pás. K ovládání sedačky je možno použít i aplikaci v mobilním telefonu. Při zaparkování sedačky lze sklopit část sedáku a područky (stupačka se přiklopí automaticky). Sedačka tak zabírá jen velmi málo místa.

### BAREVNÁ PROVEDENÍ SEDÁKU



ANTRACITE



COGNAC



HNĚDÁ





PÍSKOVÁ

### SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA UP

### ROZMĚRY

<b>B</b>	Hloubka sedačky	335 mm
<b>C</b>	Vzdálenost složené stupačky od zdi	420 mm
<b>D</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	629 mm
<b>F</b>	Minimální šířka schodiště	740 mm
<b>G</b>	Vnější šíře područek	572 mm
<b>H</b>	Vnitřní šíře područek	472 mm
<b>I</b>	Výška zádové opěrky	414 mm
<b>J</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	490 mm
<b>K</b>	Výška sedačky od země	609 mm
<b>L</b>	Celková výška sedačky nad zemí	1023 mm
-	Nosnost	140 kg
-	Rychlost	0,15 m/s

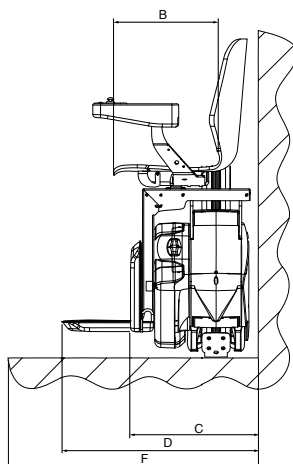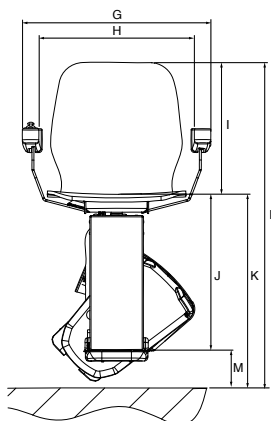



## SCHODIŠŤOVÉ SEDAČKY HANDICARE / DEVI UP S PŘÍMOU DRÁHOU - STRUČNÝ PŘEHLED

Sedací systém	1100	1000	1000 XL	1000 XXL	UP	
Volba barevného provedení	-	✓	✓	✓	✓	Výběr až ze šesti variant barevného provedení sedačky a zádové opěrky Vám umožní sladit sedačku s Vaším interiérem.
Otočná sedačka	✓	✓	✓	✓	✓	Nastupování a vystupování ze sedačky v horní stanici bude vždy pohodlné a bezpečné.
Elektricky otočná sedačka	○	○	○	✓	✓	Otáčení sedačky pomocí elektromotoru ještě více usnadní použití schodišťové sedačky.
Rozšíření područek 590	-	○	○	-	-	Rozšíření mezery mezi područkami ze standardních 550 mm na 590 mm.
Rozšíření područek 637	-	○	○	✓	-	Rozšíření mezery mezi područkami ze standardních 550 mm na 637 mm.
Zvětšení hloubky sedačky	-	○	○	✓	-	Zvětšení hloubky sedačky ze standardních 360 mm na 425 mm.
Zvýšená sedačka	-	○	○	-	-	Zvýšení sedačky pro osoby s omezenou hybností kyčelních nebo kolenních kloubů.
Venkovní provedení	-	○	○	-	-	
XXL pás se suchým zipem	-	○	○	✓	-	Prodloužený fixační pás se suchými zipy na obou stranách.
Samonavíjecí pás	✓	✓	✓	-	✓	Samonavíjecí fixační pás krémové barvy umožňuje fixaci spony na libovolném místě.
Stupačka	1100	1000	1000 XL	1000 XXL	UP	
Sklopná stupačka	✓	✓	✓	✓	-	Stupačka je sklopná manuálně.
Elektricky sklopná - ovládání pod sedákem	-	○	○	○	-	Stisknutím tlačítka se stupačka přiklopí ke sklopenému sedáku.
Elektricky sklopná - ovládání na područce	○	○	○	○	✓	Stisknutím tlačítka na područce se stupačka sklopí a odklopí i pokud uživatel sedí na sedáku.
Možnost kolejnice	1100	1000	1000 XL	1000 XXL	UP	
Nabíjení v celé délce kolejnice	✓	-	-	-	-	Baterie pohonné jednotky se nabíjí v jakémkoliv místě na kolejnici.
Nabíjení v nabíjecích bodech	-	✓	✓	✓	✓	Pomocí dálkového ovladače zaparkujete schodišťovou sedačku na nabíjecím bodě.
Úzké provedení kolejnice	✓	✓	✓	✓	✓	Úzké provedení kolejnice zvyšuje volný prostor na schodišti.
Kolejnice bez přesahu	○	-	-	-	○	Upevnění kolejnice bez přesahu na horní podestu, které zároveň umožňuje dojezd stupačky až do úrovně podesty.
Sklopný úsek kolejnice *)	○	○	-	-	○	Sklopný koncový úsek kolejnice v dolní stanici. Vhodný například, pokud jsou hned pod schodištěm dveře.
Elektricky sklopný úsek kolejnice	-	○	-	-	○	Automaticky sklopný koncový úsek kolejnice v dolní stanici pomocí elektromotoru.
Posuvná kolejnice *)	○	-	-	-	-	Kolejnice pohybující se společně se sedačkou. Vhodné řešení překážek v dolní i horní stanici.
Nosnost	1100	1000	1000 XL	1000 XXL	UP	
Nosnost	130/140 kg	137 kg	160 kg	200 kg	140 kg	

✓ Standardní výbava    ○ možnost přobjednání    - nenabízí se

\*Nosnost sedačky maximálně 120 kg



## JAK SI VYBRAT A OBJEDNAT

V případě Vašeho zájmu o schodišťovou sedačku se na nás obraťte. Navštíví Vás, zdarma a nezávazně, náš technik. Posoudí vhodnost instalace schodišťové sedačky na Vaše schodiště, společně s Vámi vybere vhodné umístění kolejnice a nabídne varianty řešení a příslušenství.



Díky inovativnímu systému Handicare Vision vyobrazíme na displeji tabletu umístění sedačky přímo na Vašem schodišti. Dokážete si

tak lépe představit, jak bude na schodišti a ve Vašem interiéru sedačka vypadat. Díky systému Vision si také lépe vyberete z nabízených variant kolejnic, sedaček a jejich barevností. Dokážeme Vám také vyobrazit různé standardní funkcionality nebo možnosti příslušenství.

Po domluvě na konkrétní variantě a provedení schodišťové sedačky technik zaměří schodiště. Při návštěvě technika, anebo následně, podle rozsahu příslušenství anebo obtížnosti řešení umístění schodišťové sedačky na Vaše schodiště, Vám sdělíme cenu, nebo zašleme cenovou nabídku.

Schodišťová sedačka je ve smyslu zákona 329/2011 Sb. zvláštní pomůckou, na kterou tělesně postiženému občanovi přispívá Úřad práce ČR až do výše 90 % ceny této pomůcky. Jako podklad Vaší žádosti poslouží cenová nabídka od nás. Rádi Vám s postupem žádosti poradíme.



Pokud se pro naši nabídku rozhodnete, ať již s úhradou z vlastních prostředků nebo s využitím příspěvku od úřadu práce, zavolejte nám, nebo pošlete Vaši objednávku e-mailem. Požádáme Vás o úhradu zálohy a zadáme Vaši schodišťovou sedačku do výroby. Instalace sedačky proběhne do 1 až 4 týdnů a trvá obvykle 4 - 6 hodin.



## HANDICARE 4000

Schodišťová sedačka pro víceramenná schodiště, jejíž kolejnice je tvořena dvěma nad sebou umístěnými trubkami s ozubeným hřebenem. Kolejnice zasahuje do schodiště jen v minimální míře a dokáže se přizpůsobit i velmi ostrým ohybům schodiště. Základní nosnost sedačky je 136 kg, lze ji však zvýšit až na 160 kg a může být instalována na vnitřní i vnější obvod schodiště.

U schodišťové sedačky na víceramenná schodiště je vždy potřeba najít optimální umístění, zvolit vhodnou dolní stanici, průběh dráhy, případně mezistanice, pokud jsou potřeba, a také umístění horní stanice. Sedačka je bateriová, její nabíjení probíhá v dolní nebo horní stanici a také ve všech mezistanicích, pokud jsou na dráze instalovány. Někdy je účelné, aby sedačka neparkovala v žádné stanici, pak je možno umístit nabíjecí bod kdekoliv na dráze. Díky tomu, že sedačku pohánějí baterie je plně funkční i v případě výpadku proudu. Součástí dodávky sedačky je vždy stejný počet dálkových ovladačů, jako je stanic sedačky. Dálkovým ovladačem lze sedačku přivolat, anebo také odeslat mezi stanicemi. Dálkové ovladače jsou užitečné tam, kde sedačku využívá více lidí v domácnosti.

### BAREVNÁ PŘEVODNÍ SEDÁKU



KAKAOVÁ

VÍNOVĚ ČERVENÁ

PÍSKOVÁ

ŠEDÁ

### BAREVNÁ PŘEVODNÍ KOLEJNICE



SVĚTLE ŠEDÁ

HNĚDÁ

ŠEDO ČERNÁ

Na pohonné jednotce schodišťové sedačky je instalován sedák SMART. Potah sedáku a záďové opěrky je velmi odolný, omyvatelný a při objednání sedačky lze zvolit z výše uvedených barevností. K ovládání sedačky slouží páčka na pravé nebo levé područce. Sedačka je doplněna bezpečnostním pásem a klíčkem, kterým lze sedačku uzamknout a zabránit tak jejímu nežádoucímu používání. Sedák lze v horní stanici manuálně otočit o 90°. Sedačka má sklopný sedák, sklopnou stupačku a područky. Sedačku lze doplnit řadou příslušenství jako je elektricky otočná sedačka nebo elektrické sklápění stupačky.



Schodišťovou sedačku Handicare 4000 lze dodat se zvýšenou nosností 160 kg. Jako jedna z mála sedaček na trhu může být dodána i ve venkovním provedení. V této verzi je sedák vždy v šedé barvě z UV stabilního materiálu a sedačka je doplněna krytem.



# SEDAČKY NA VÍCERAMENNÁ SCHODIŠTĚ



Pomocí dálkového ovladače lze sedačku přivolat i odeslat do jiné stanice nebo nabíjecího místa.






Ovládací páčku lze ovládat prsty nebo celým zápěstím. Díky jejímu umístění je možno páčku ovládat a zároveň mít pevný a jistý úchop na područce.



Bezpečnostní pás se sponou vpředu nebo na straně ještě zvýší pocit Vašeho bezpečí.



Otáčení sedačky lze ovládat páčkou na levé i pravé straně sedačky. Jako doplněk může být toto otáčení elektrické.

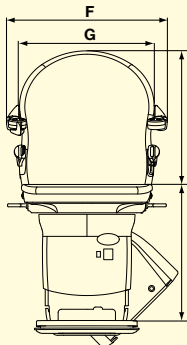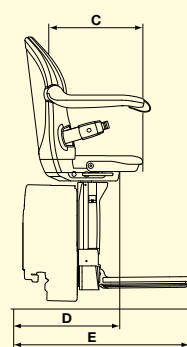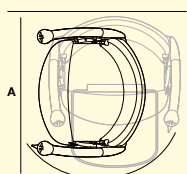

## HANDICARE 4000 SMART

## ROZMĚR

	Radius otáčení	700 mm
<b>A</b>	Radius otáčení při rozšíření područek o 56 mm	735 mm
	Radius otáčení při rozšíření područek o 102 mm	750 mm
	<b>B</b>	Vzdálenost od zdi po vnitřní stranu zádové opěrky
<b>C</b>	Hloubka sedačky	360 mm
	Hloubka sedačky u sedáku se zvětšenou hloubkou	425 mm
<b>D</b>	Vzdálenost složené stupačky od zdi	410 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	695 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	530 mm
	Vnější šíře područek při rozšíření područek o 56 mm	590 mm
	Vnější šíře područek při rozšíření područek o 102 mm	635 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	410 mm
	Vnitřní šíře područek při rozšíření područek o 56 mm	470 mm
	Vnitřní šíře područek při rozšíření područek o 102 mm	512 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	455 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	490-590 mm
	Vzdálenost sedačky od stupačky - při zvýšené sedačce	675-875 mm
	Vzdálenost sedačky od stupačky - snížený sedák	440-540 mm
-	Standardní nosnost	136 kg
-	Zvýšená nosnost	160 kg

Některé z uvedených rozměrů jsou závislé na konkrétním provedení instalace na dané schodiště. Každé schodiště je individuální, při zaměření nebo instalaci se mohou vyskytnout okolnosti, které neumožní instalovat schodišťovou sedačku v takové pozici, která by umožňovala dodržení výše uvedených parametrů.



## VAN GOGH REMBRANDT

Schodišťové sedačky pro víceramenná schodiště s elegantní kolejničí tvořenou jedinou trubkou. Schodišťovou sedačku Van Gogh lze instalovat na VNĚJŠÍ stranu schodiště, model Rembrandt je pak určený pro VNITŘNÍ stranu schodiště. Nosnost sedačky je 125 kg.

Předností modelů Van Gogh a Rembrandt je vyjma moderního designu kolejnice o průměru 75 mm se skrytým ozubeným hřebenem ze spodní strany také možnost instalovat tuto kolejnici i na velmi příkrá schodiště. Díky velké tuhosti této konstrukce kolejnice je také potřeba výrazně méně nosných nohou. Schodišťová sedačka tak působí velmi lehce.

U schodišťové sedačky na víceramenná schodiště je vždy potřeba najít optimální umístění, zvolit vhodnou dolní stanicí, průběh dráhy, případně mezistanice, pokud jsou potřeba, a také podobu horní stanice. Při objednání lze vybrat jednu ze tří variant barevného provedení kolejnice, anebo vyrobiť kolejnici ve zcela individuální barvě. Kolejnice zasahuje do schodiště 170 mm. Sedačka je bateriová, její nabíjení probíhá v dolní nebo horní stanici a také ve všech mezistanicích, pokud jsou na dráze instalovány. Díky tomu, že sedačku pohánějí baterie je plně funkční i v případě výpadku proudu. Součástí dodávky sedačky je vždy stejný počet dálkových ovladačů, jako je stanic sedačky. Dálkovým ovladačem lze sedačku přivolat, anebo také odeslat mezi stanicemi. Dálkové ovladače jsou užitečné tam, kde sedačku využívá více lidí v domácnosti.

K ovládní sedačky slouží páčka na područce, Při objednání sedačky si můžete zvolit, zda si přejete sedačku ovládat pravou nebo levou rukou. Při objednání je možno vybrat některý z bezpečnostních pásů ke zvýšení pocitu bezpečí uživatele na sedačce. Pod područkou je také klíček, kterým lze sedačku uzamknout a zabránit tak jejímu nežádoucímu používání. Na pohonné jednotce schodišťové sedačky mohou být instalovány tři druhy sedáků – Sedák Classic, sedák Alliance a sedák Elegance.



Více o těchto sedácích najdete na straně 13.

### BAREVNÁ PŘÍKROVÁNÍ KOLEJNICE



KRÉMOVÁ



HNĚDÁ



ŠEDÁ



## VERMEER

Schodišťová sedačka Vermeer je téměř totožná se schodišťovou sedačkou Rembrandt. Je však uzpůsobena pro instalace v bytových domech o dvou a více poschodích.

Maximální délka kolejnice může být až 35 metrů a na dráze lze instalovat až 10 stanic. V každé stanici je také nabíjecí místo – sedačku tak lze parkovat v libovolné stanici. Zároveň ke každé stanici přináleží jeden dálkový ovladač, kterým je možno sedačku přivolat. Pohonná jednotka sedačky je vybavená baterií se zvýšenou kapacitou 20Ah a zvládne tak i intenzivnější provoz. Na jedno nabití může sedačka ujet vzdálenost až 700 m. Pro snadnější orientaci, kde se právě sedačka nachází, může být aktivována akustická odezva sedačky na stisknutí kteréhokoliv dálkového ovladače.

Stejně jako u schodišťové sedačky Rembrandt i u varianty Vermeer je možno vybrat ze tří druhů sedáků Classic, Elegance nebo Alliance.

Při návrhu schodišťové sedačky do vícepatrových bytových domů jsme připraveni řešit specifické požadavky. Může se jednat o speciálně upravené ovladače, jejichž signál bezpečně projde železobetonovou konstrukcí moderních domů, požadavek na umístění ovladačů v pevných schránkách, nebo jen větší počet klíčků k uzamčení sedačky před jejím neoprávněným použitím.

Zajímavá je u této sedačky také její cena. Pro dvou a vícepatrové budovy můžeme nabídnout speciální ceny. Obratě se na nás, rádi Vám zpracujeme návrh konkrétně pro Vás.



### BAREVNÉ PŘÍKRYTÍ KOLEJNICE



KRÉMOVÁ



HNĚDÁ



ŠEDÁ



Na pohonné jednotce schodišťové sedačky Van Gogh, Rembrandt nebo Vermeer mohou být instalovány tři druhy sedáků.

## SEDÁK CLASSIC

Materiál sedáku a zádové opěrky je velmi odolná, měkčená a omyvatelná pěnová guma. Při objednání sedačky lze volit z uvedených barevností.



ČERVENÁ BORDEAUX



BÉŽOVÁ



ANTRACIT



## SEDÁK ALLIANCE

Tento designový sedák je tvořen kombinací dřeva a polstru. Čalounění polstru je z důvodu jeho snazší údržby vyrobeno z umělé textilie. Sedák působí velmi elegantním a moderním dojmem. Při objednání je možno volit z uvedených kombinací světlého nebo tmavého dřeva a třech barevností čalounění.



ČERVENÁ BORDEAUX  
BÍLÉ DŘEVO



HNĚDÁ  
BÍLÉ DŘEVO



KRÉMOVÁ  
HNĚDÉ DŘEVO



## SEDÁK ELEGANCE

Jednoduchý a elegantní sedák s potahem z umělé kůže. Barevné provedení polstrů sedáku a zádové opěrky je doplněno shodným dekorem na područkách. Na výběr jsou tři barevné varianty.



HNĚDÁ



KRÉMOVÁ



ČERVENÁ BORDEAUX



K ovládání sedačky slouží páčka na područce vybraného sedáku. Při objednání sedačky si můžete zvolit, zda si přejete sedačku ovládat pravou nebo levou rukou. Při vychýlení páčky dojde k aktivování jízdy sedačky. Pod područkou je také klíček, kterým lze sedačku uzamknout a zabránit tak jejím nežádoucímu používání.

Sedák lze v horní stanici otočit o 90°. Tím se velmi usnadní vstávání anebo usedání a také zvýší pocit bezpečí uživatele. Otočení sedáku je možné také pomocí elektromotoru.

Rozměry schodišťových sedaček i sedáků Classic, Alliance a Elegance jsou uvedeny na straně 15.



## DÁLKOVÝ OVLADAČ

Dálkovým ovladačem lze přivolat nebo odeslat sedačku, ať jste na schodišti kdekoli. Ovladač je bateriový a je dodáván s držákem, který lze upevnit na zeď.



## TURN & GO

Pokud máte úzké schodiště, lze využít funkce Turn & Go, při které se sedačka nejprve natočí o 70° ve směru jízdy a pak teprve vyjede ze stanice. Tím lze dosáhnout možnosti instalovat schodišťovou sedačku na schodiště o celkové šíři jen 69 cm.



## ACTIVE SEAT

Tento doplněk Vám usnadní vstávání i usedání na sedák Vaší schodišťové sedačky. Pod dosedací plochou je pružina, o vhodné zvolené tuhosti dle Vaší hmotnosti, která pomáhá dosedací plochu sklápět směrem vpřed. Síla této pružiny pak snižuje nároky na sílu, kterou musíte při vstávání a usedání vynaložit Vy.



## SKLOPNÁ KOLEJNICE

Kolejnice schodišťové sedačky může v některých případech v dolní nebo horní stanici překážet. Kolejnice může zasahovat do chodby, u hrany schodiště mohou být dveře nebo jiné úzké místo. I pro tyto případy existuje řešení. Dolní úsek kolejnice může být elektricky sklopný.



**HANDICARE**      **TYP SEDÁKU CLASSIC**      **ROZMĚR**  
**VAN GOGH/REMBRANDT/VERMEER**      **VAN GOGH**      **REMBRANDT**      **VERMEER**




<b>A</b>	Radius otáčení	730-665 mm	750-685 mm	750-685 mm
<b>C</b>	Hloubka sedačky	370 mm	370 mm	370 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	640 mm	660 mm	660 mm
	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi - zkosená stup.	610 mm	630 mm	630 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	560 mm	560 mm	560 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	440 mm	440 mm	440 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	400 mm	400 mm	400 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	475 mm	475 mm	475 mm
-	Nosnost	125 kg	125 kg	125 kg

**HANDICARE**      **TYP SEDÁKU ALLIANCE**      **ROZMĚR**  
**VAN GOGH/REMBRANDT/VERMEER**      **VAN GOGH**      **REMBRANDT**      **VERMEER**

<b>A</b>	Radius otáčení	700-720 mm	720-740 mm	720-740 mm
<b>C</b>	Hloubka sedačky	380 mm	380 mm	380 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	640 mm	660 mm	660 mm
	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi - zkosená stup.	610 mm	630 mm	630 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	565-595 mm	565-595 mm	565-595 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	435-465 mm	435-465 mm	435-465 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	395-415 mm	395-415 mm	395-415 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	490 mm	490 mm	490 mm
-	Nosnost	125 kg	125 kg	125 kg

**HANDICARE**      **TYP SEDÁKU ELEGANCE**      **ROZMĚR**  
**VAN GOGH/REMBRANDT/VERMEER**      **VAN GOGH**      **REMBRANDT**      **VERMEER**

<b>A</b>	Radius otáčení	700-720 mm	720-740 mm	720-740 mm
<b>C</b>	Hloubka sedačky	386 mm	386 mm	385 mm
<b>E</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	640 mm	660 mm	660 mm
	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi - zkosená stup.	610 mm	630 mm	630 mm
<b>F</b>	Vnější šíře područek	565-595 mm	565-595 mm	565-595 mm
<b>G</b>	Vnitřní šíře područek	435-465 mm	435-465 mm	435-465 mm
<b>H</b>	Výška zádové opěrky	395-415 mm	395-415 mm	395-415 mm
<b>I</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	490 mm	490 mm	490 mm
-	Nosnost	125 kg	125 kg	125 kg

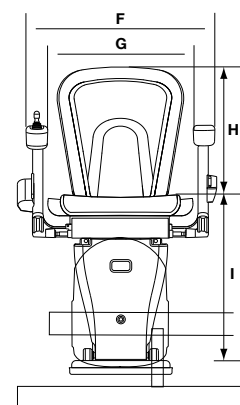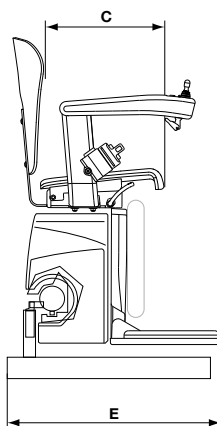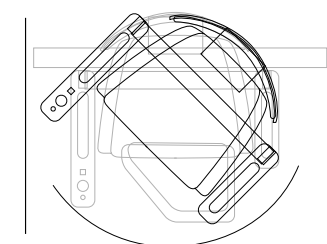

Některé z uvedených rozměrů jsou závislé na konkrétním provedení instalace na dané schodiště. Každé schodiště je individuální, při zaměření nebo instalaci se mohou vyskytnout okolnosti, které neumožní instalovat schodišťovou sedačku v takové pozici, která by umožňovala dodržení výše uvedených parametrů.



## UP - VÍCERAMENNÁ

Schodišťová sedačka UP je určená na víceramenná schodiště. Je vhodná zejména na vnější obvod víceramenného schodiště, kde oceníte minimalistický design kolejničky a ostré oblouky, které zasahují do podesty schodiště jen minimálně. Schodišťová sedačka UP má technicky mimořádné provedení konstrukce kolejničky, což skýtá pro uživatele řadu ekonomických i provozních výhod.

Kolejničky sestává z hliníkových segmentů – oblouků a rovných dílů z extrudovaných duralových profilů. Kolejničky je vyrobena na míru na Vaše schodiště, je však možno ji v budoucnu upravit – například prodloužit do dalšího patra, nebo instalovat na zcela jiném schodišti. Tato ekonomická výhoda se projevuje již v ceně prvotní instalace a zároveň umožňuje, jako u jediného modelu na trhu, použítou schodišťovou sedačku prodat a instalovat na jiné schodiště. Toto technické řešení zároveň umožňuje dodání již do týdne od zaměření schodiště.

Sedačka UP sestává z pohonné jednotky a sedáku. Sedačka je vždy elektricky otočná a stupačka je elektricky sklopná. Na výběr jsou 4 barevnosti umělé kůže. Součástí instalace jsou také dva dálkové ovladače a samonavíjecí bezpečnostní pás. K ovládání sedačky je možno použít i aplikaci v mobilním telefonu. Při zaparkování sedačky lze sklopit část sedáku a područky (stupačka se přiklopí automaticky). Sedačka tak zabírá jen velmi málo místa.

### BAREVNÉ PŘÍKROVĚNÍ SEDÁKU



COGNAC

HNĚDÁ

PÍSKOVÁ



ANTRACIT



### SCHODIŠŤOVÁ SEDAČKA UP

### ROZMĚRY

<b>B</b>	Hloubka sedačky	335 mm
<b>C</b>	Vzdálenost složené stupačky od zdi	422 mm
<b>D</b>	Vzdálenost vyklopené stupačky od zdi	631 mm
<b>F</b>	Minimální šířka schodiště	740 mm
<b>G</b>	Vnější šíře područek	572 mm
<b>H</b>	Vnitřní šíře područek	472 mm
<b>I</b>	Výška zádové opěrky	414 mm
<b>J</b>	Vzdálenost sedačky od stupačky	489 mm
<b>K</b>	Výška sedačky od země	563 mm
<b>L</b>	Celková výška sedačky nad zemí	977 mm
-	Nosnost	125 kg
-	Rychlost	0,15 m/s

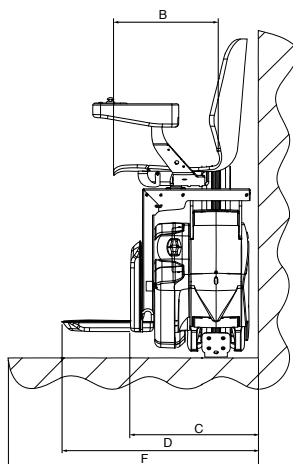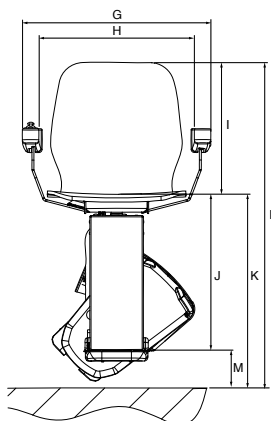



## JAK SI VYBRAT A OBJEDNAT

V případě Vašeho zájmu o schodišťovou sedačku se na nás obraťte. Navštíví Vás, zdarma a nezávazně, náš technik. Na místě posoudí vhodnost instalace schodišťové sedačky na Vaše schodiště. Na základě Vašich požadavků Vám navrhne nejvhodnější umístění a podobu dolní a horní stanice. V případě, že by sedačka měla pokrývat více podlaží, navrhne také umístění mezistanic, případně dodatečných nabíjecích bodů. Technik změří předpokládanou délku dráhy kolejnice. Při zaměření se také domluvíte o místě zapojení Vaší sedačky do zásuvky 230V. Na základě těchto informací Vám následně zpracujeme přesnou cenovou nabídku.



Pokud se pro instalaci schodišťové sedačky rozhodnete, zaměříme zcela přesně Vaše schodiště fotometrickou metodou. Součástí tohoto zaměření je také vizualizace schodišťové sedačky na Vašem schodišti. V tomto okamžiku si zvolíte vhodnou barevnost kolejnice a sedáku a odsouhlasíte si přesné umístění jednotlivých klíčových bodů dráhy této schodišťové sedačky.

Schodišťová sedačka je ve smyslu zákona 329/2011 Sb. zvláštní pomůckou, na kterou tělesně postiženému občanovi přispívá Úřad práce ČR až do výše 90 % ceny této pomůcky. Jako podklad Vaší žádosti poslouží cenová nabídka od nás. Rádi Vám s postupem žádosti poradíme.



Pokud se pro naši nabídku rozhodnete, ať již s úhradou z vlastních prostředků nebo s využitím příspěvku od úřadu práce, zavolejte nám nebo pošlete Vaši objednávku e-mailem. Požádáme Vás o úhradu zálohy a zadáme Vaši schodišťovou sedačku do výroby. Instalace pak proběhne za 1 až 4 týdny a trvá obvykle 6 až 8 hodin. U vícepatrových instalací může instalace trvat i déle.






## VÍCE NEŽ 125 LET ZKUŠENOSTÍ



Firma Handicare navrhuje, vyrábí a instaluje schodišťové sedačky již více než 125 let. Díky této zkušenosti produkují nejen kvalitní spolehlivé a tiché schodišťové sedačky, dokáží také své zkušenosti zúročit při zdokonalování jejich návrhů, designu a postupů instalace. Nadčasový design, provedení a veškeré aspekty jejich fungování a ovládání jsou uzpůsobeny potřebám osob dříve nazezených.

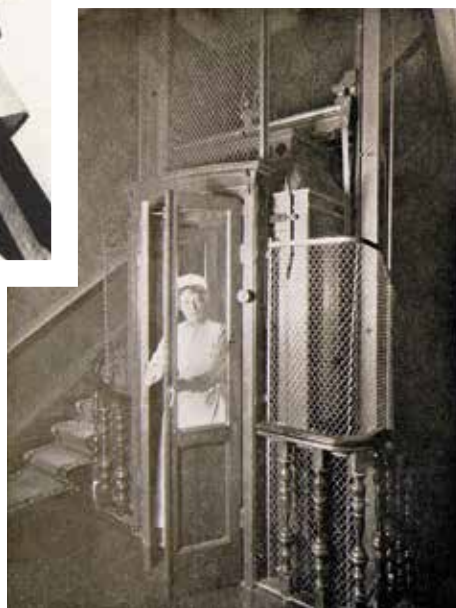

Společnost Handicare má v současné době sídlo v Holandsku. Zde se schodišťové sedačky také navrhují, vyrábí se zde kolejnicové systémy a kompletují se pohonné jednotky a sedáky. Některé komponenty schodišťových sedaček Handicare 4000 jsou vyráběny ve Velké Británii.



## CO DÁLE NABÍZÍ ORTOSERVIS S.R.O.

Schodišťové sedačky instaluje naše společnost od roku 2011. Již více jak 25 let jsme však jedním z předních dodavatelů zdravotnických prostředků. Nabízíme nejen velmi široký sortiment pomůcek pro tělesně postižené a seniory, poskytujeme také služby spojené s jejich návrhem, individuální úpravy a servis. Zdravotnické prostředky dodáváme na poukazy všech zdravotních pojišťoven v ČR, je možno si je také zakoupit na našich čtyřech prodejnách, anebo prostřednictvím eshopu.

V našem sortimentu najdete více než 550 různých produktů. Níže vybíráme několik hlavních skupin.



### ELEKTRICKÉ VOZÍKY

V nabídce máme 16 modelů elektrických vozíků. Navrhne Vám vhodný model i úpravy podle Vašich potřeb.



### BERLE A HOLE

Hole dřevěné, duralové, s pevnou nebo nastavitelnou výškou. Berle nabízíme v mnoha provedeních i barevnostech, francouzské nebo podpažní. Můžeme nabídnout také speciální a se zvýšenou nosností.

### POMŮCKY PRO DĚTI

Berle, chodítka, mechanické a elektrické vozíky, stabilizační zdravotnické prostředky. Předvedeme Vám a navrhne vhodné pomůcky pro naše nejmenší klienty.



### MECHANICKÉ VOZÍKY

Dodáváme základní mechanické vozíky, odlehčené, aktivní i sportovní. Vozíky Vám rádi předvedeme, zaměříme a poradíme s výběrem nevhodnějšího vozíku pro Vás.



### POMŮCKY DO DOMÁCNOSTI

Široký sortiment drobných užitečných pomůcek pro usnadnění každodenních činností v kuchyni, v koupelně nebo třeba při oblékání.



### DO KOUPELNY A NA WC

Stoličky a sedačky do vany a sprchového koutu, toaletní židle a vozíky, vanové zvedáky, anebo například madla, která zajistí Vaši soběstačnost i při úkonech osobní hygieny.



### LŮŽKA

Elektricky polohovatelná pečovatelská lůžka mají výhodu nejen v elektricky polohovatelném roštu, ale také v elektrickém nastavení výšky ložné plochy. Tím usnadníte přesun uživatele i práci pečovatěm.



**A mnoho dalšího. Vše, co není vyráběno na míru, máme skladem!**

### PŮJČOVNA POMŮCEK

Pokud potřebujete pomůcku pouze dočasně, anebo je potřeba vyřešit nastalou situaci bez odkladu, můžete využít naší půjčovny. Půjčujeme chodítka, zvedáky, lůžka a mechanické vozíky.



## PRAHA

Ronkova 13/353, 180 00 Praha 8, Libeň

tel.: 266 313 652 fax: 266 313 652 linka 11

e-mail: ortoservis@ortoservis.cz



Po-Pá 8:30 - 12:00 a 12:30 - 17:00 Po telefonické konzultaci i mimo tuto dobu.

Dostanete se k nám metrem trasy B ze stanice Palmovka, výstupem k ulici Na Hrázi a odtud doprava cca 150 m.



## BRNO

Minská 100

616 00 Brno, Žabovřesky

tel./fax: 541 240 393

e-mail: brno@ortoservis.cz



Po - Pá 8:30 - 12:00 a 12:30 - 16:30



## ČESKÉ BUDĚJOVICE

Staroměstská 2608

370 04 České Budějovice

tel./fax: 387 432 502

e-mail: cb@ortoservis.cz



Po-Pá: 9:00 - 12:00 a 12:30 - 17:00



## OPAVA

Pivovarská 7/71

746 01 Opava

tel./fax: 553 775 226

e-mail: opava@ortoservis.cz



Po-Pá: 8:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Návrhy a instalace schodišťových sedaček provádíme na celém území České a Slovenské republiky.

Návrhy, nabídky, dodávky a servis stejně tak jako záruční podmínky se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem společnosti Ortoservis s.r.o. uvedenými na webu [www.seniorservis.cz](http://www.seniorservis.cz)

Tiskové chyby vyhrazeny.